



CICA-CARE[◇]

실리콘 겔

제품설명

CICA-CARE 실리콘 겔은 의료용 실리콘으로 구성된 반투명형 겔입니다. 이 제품은 동일한 환자에게 여러 차례 도포할 수 있는 단일 환자 전용 제품입니다.

사용목적

CICA-CARE 실리콘 겔은 이미 존재하거나, 새롭게 생성된 빨갛거나 출혈된 흉터를 관리하도록 고안되었으며, 이러한 흉터의 생성을 방지하기 위해 아픈 상처에 예방 적 관리 용도로 사용됩니다.

급기사항

피부질환 (예, 건선, 여드름)이 있는 곳에 사용하지 마십시오.

눈이나 점막 위에는 도포하지 마십시오.

손상된 상태의 피부에는 사용하지 마십시오.

주의사항

외용제에만 사용하십시오.

CICA-CARE 실리콘 겔은 인화성 물질입니다. 불꽃 및 발화원 (예, 불이 붙은 담배) 주변에서 사용을 금하십시오.

CICA-CARE 실리콘 겔을 도포하기 전에 겔을 도포할 부위가 깨끗하고 습기가 전혀 없는지를 확인하십시오.

피부트러블이 발생하거나 피부 상태가 악화되는 것으로 보이면, 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오.

사용방법

1. 흉터 부위를 깨끗이 씻고 완전히 말리십시오.
2. 두껍게 열고 흉터 부위를 적절히 덮을 정도의 충분한 양의 실리콘 겔을 짜내십시오.
3. CICA-CARE 실리콘 겔을 흉터 부위에 얇게 펴서 부드럽게 마사지 하십시오. 겔이 건조 되고 나면 눈에 보이지 않는 막이 생깁니다.
4. 실리콘 겔이 4-6주 이내에 건조되지 않는다면, 과다 도포된 겔을 제거하십시오.
5. 실리콘 겔이 마른 후 생성된 막 위에 화장품을 바를 수 있습니다.
6. 실리콘 겔을 하루에 최소 2회 이상 흉터 부위에 바릅니다.
7. 사용 후에는 항상 두껍게 덮어 두십시오. 사용하지 않고 남은 실리콘 겔은 원래의 튜브에 그대로 두고, 불꽃 및 발화원이 없는 건조한 곳(<25°C/77°F)에 보관하십시오.

제품규격

제품	설명	중량	1박스 내 개수
66801491	CICA-CARE 실리콘 겔	5g	1

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England
www.smith-nephew.com

© Smith & Nephew
TM & Made in Smith & Nephew

